




Allergietest für Hunde

Anleitung zur Probenentnahme

Nehmen Sie die Auffangeinrichtung und die kleine Röhre aus der Verpackung und führen Sie die folgenden sechs Schritte durch:

- 1 Legen Sie die kleine Röhre mit Flüssigkeit (c) zur Seite, aber griffbereit.

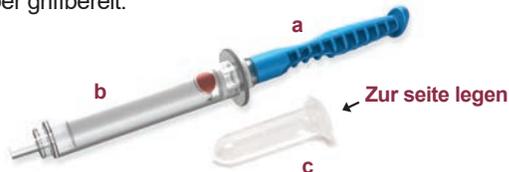

- 2 Entfernen Sie den Stiel (a) von der Plastikröhre (b) und halten Sie sie (b) griffbereit.



- 3 Halten Sie den blauen Stiel (a). Das Röhrchen (b) wurde bereits entfernt und ein Baumwollelement ist sichtbar.



- 4 Am blauen Stiel greifend, platzieren Sie das Element im Maul Ihres Tieres und tränken es so mit dem Speichel.




- 5 Halten Sie den Apparat solange im Maul des Tieres, bis der Indikator in der Mitte eine erkennbare rote Farbe zeigt. Es kann 15 Sekunden bis zu mehreren Minuten dauern, bis genügend Speichelflüssigkeit aufgesaugt wurde.



LETZTER SCHRITT: Sie haben es geschafft!

Sobald Sie fertig sind, können Sie (a) und (b) entsorgen. Versichern Sie sich, dass das Röhrchen (c) mit der Probe Ihres Tieres **fest verschlossen** ist. Verschließen und senden Sie die Probe zur Analyse in dem dafür vorgesehenen Umschlag zurück.

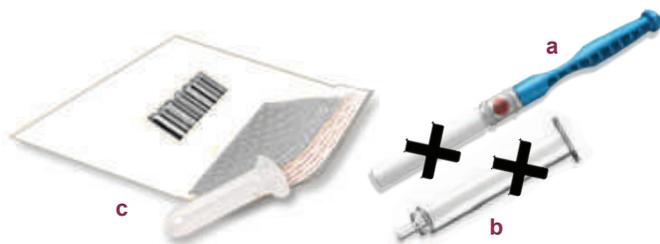

- 6 Setzen Sie das Plastikröhrchen (b) über das Baumwollelement. Stecken Sie die mit Flüssigkeit gefüllte Röhre (c) auf das Ende der großen Röhre (b). Es sollte einrasten und klicken. Sobald dies getan ist, sollten Sie den blauen Stiel kräftig drücken, sodass die Speichelflüssigkeit in die untere Röhre (c) tropft. Falls sich die Flüssigkeit schon etwas gefestigt hat, können Sie ein wenig Wasser hinzugeben. Dies sollte allerdings nur passieren, wenn Sie das Set schon einige Wochen haben.



BEMERKUNGEN:

- Sie können mehrere Male versuchen, genügend Speichel zu bekommen. Es muss nicht direkt beim ersten Anlauf passieren.
- Sie können z.B. ein Leckerli vor Ihren Hund halten, um Speichel zu sammeln, da dieser so zur erhöhten Speichelproduktion stimuliert wird.

ZUSÄTZLICHE TIPPS:

- Bitte senden Sie uns Ihre Probe innerhalb von 24 Stunden nach der Entnahme zu.
- Dazu empfehlen wir, die Probe/n unter der Woche zu entnehmen und zu versenden, sodass es nicht zu unnötigen Wartezeiten durch das Postsystem kommt.
- Proben haben eine Lebensdauer von ungefähr 10 Tagen nach Entnahme.